


Erste Schritte mit myAbilia und CARY Base



Erste Schritte mit myAbilia – Schritt für Schritt

1. myAbilia-Konto einrichten

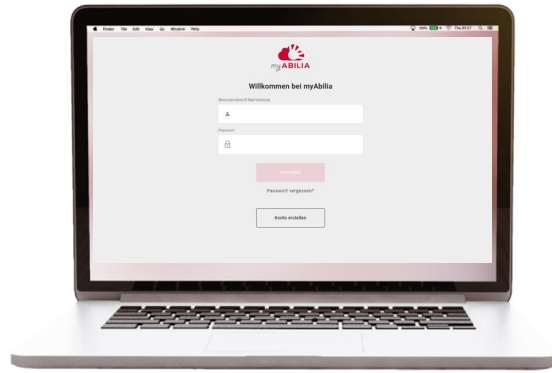


- Gehen Sie mit einem Computer, Mobiltelefon oder Tablet auf www.myabilia.com.
- Erstellen Sie ein Benutzerkonto auf myAbilia.
- Melden Sie sich bei myAbilia an.
- Wählen Sie das Kalendermodul CARY.**
- Importieren Sie die Bildbibliothek CARY.**

2. CARY Base mit myAbilia verbinden



Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem WLAN verbunden ist und melden Sie sich mit dem Benutzerkonto an.

3. Aktivität hinzufügen

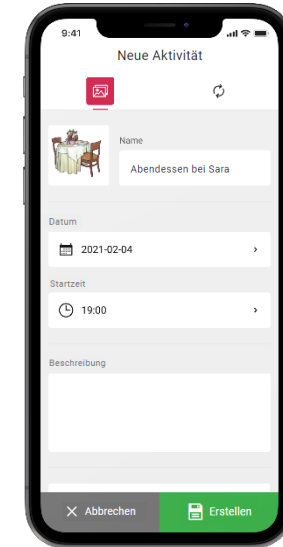

Melden Sie sich auf einem Computer, Mobiltelefon oder Tablet bei www.myabilia.com an.

Verwenden Sie myAbilia, um den Kalender in CARY Base zu verwalten.


Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.

Ein Benutzerkonto bei myAbilia erstellen



1. Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu www.myabilia.com.
2. Wählen Sie **Konto erstellen**.
3. Wählen Sie den Kontotyp **Benutzer** und folgen Sie den Anweisungen.

www.myabilia.com



Willkommen bei myAbilia

Benutzername/E-Mail-Adresse

Passwort

Anmelden

[Passwort vergessen?](#)

Konto erstellen


Anmelden bei myAbilia




1. Öffnen Sie einen Webbrowser und gehen Sie zu www.myabilia.com.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, um sich anzumelden.

The image shows the myAbilia login process. On the left is the web login page with the myABILIA logo, a welcome message, and input fields for 'Benutzername/E-Mail-Adresse' (anna@gmail.com) and 'Passwort'. A red 'Anmelden' button is highlighted with an arrow pointing to the mobile app interface on the right. The app interface shows a calendar for 'Woche 34' with a sidebar menu containing options like 'Kalender', 'Standardaktivitäten', 'Standardtimer', 'Checkliste', 'Bildarchiv', 'Hinweise', and 'Sprachhinweis'.

Wählen Sie das Kalendermodul CARY

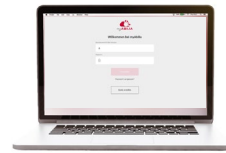


1. Wählen Sie  und **Mein Profil** im Menü aus.
2. Wählen Sie die Registerkarte **Module** und die für CARY vorgesehenen Module aus:
 - Kalender – CARY
 - Standardaktivitäten
 - Bildarchiv
3. Wählen Sie **Speichern**.


The screenshot shows the user profile settings for 'Anna'. The 'Module' tab is active, displaying a list of modules. The 'Kalender' section is highlighted with a blue circle, containing the following options:

- Kalender
 - MEMOplanner
 - HandiCalendar
 - CARY
- Standardaktivitäten
- Standardtimer
- Checkliste
- Bildarchiv
- Hinweise
- Sprachhinweis
- GEWA

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save).

Das Bildarchiv CARY importieren

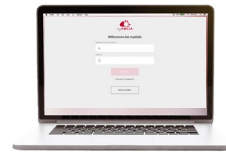

1. Wählen Sie  im Menü und **Bildarchiv**.
2. Wählen Sie **Neu** und **Import aus Bildbibliothek**.
3. Wählen Sie Bildarchiv **CARY** und **Hinzufügen**.

The screenshot displays the ABILIA software interface. On the left, a sidebar shows the user profile 'Anna' and navigation options: 'Kalender', 'Standardaktivitäten', and 'Bildarchiv'. The 'Bildarchiv' option is selected. A dropdown menu is open under the 'Neu' button, with 'Aus Bildbibliothek importieren' circled in blue. The main area shows the 'Bildbibliothek' section with a list of folders: 'Badezimmer', 'CARY', 'Grundlegende Bilder', 'Handi', 'Kleidung', 'Schule', and 'Smileys'. The 'CARY' folder is circled in blue. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' (grey) and '+ Hinzufügen' (green).


CARY Base mit myAbilia verbinden



1. Gehen Sie zum Menü Ein/Aus und wählen Sie **Einstellungen**.




2. Wenn das Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, wählen Sie **Internet** und dann ein verfügbares Netzwerk (WLAN).
3. Wählen Sie **myAbilia**.
4. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein, um sich anzumelden.
5. Wählen Sie **Zurück** und dann **Schließen**, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

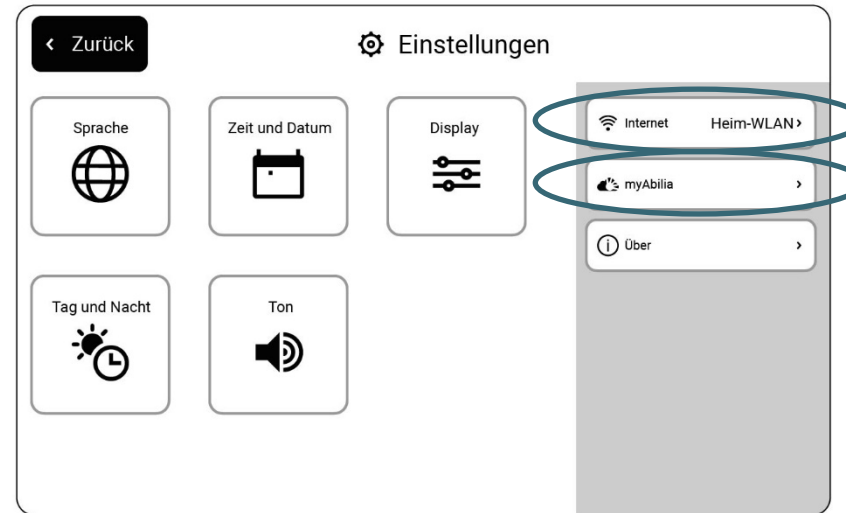

Aktivität hinzufügen


1. Melden Sie sich mit Ihrem Benutzerkonto auf www.myabilia.com an.
2. Tippen Sie direkt in den Kalender, um **Datum** und **Startzeit** der Aktivität auszuwählen.
3. Geben Sie den Namen der Aktivität in das Feld **Name** ein.
4. Sie können auch ein **Bild** und eine **Beschreibung** zur Aktivität hinzufügen, aber dies ist optional.
5. Wählen Sie , um **eine Nachricht** oder einen **Text abzuspielen**, wenn die Erinnerung angezeigt wird (optional).
6. Klicken Sie auf **Erstellen**, um die Aktivität zu speichern.

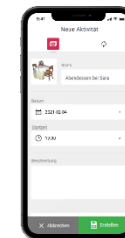

🕒 CARY ▾ Neue Aktivität

Name & Bild Intervall

Bild



Name

Den hund spazieren führen

Datum

2023-02-09

Beschreibung

Plastiktüten nicht vergessen

Startzeit

09:00

Nachricht aufzeichnen

Zusatzeneinstellungen

Im Tagesplan anzeigen Text bei Alarm abspielen

Abbrechen Erstellen

Mitteilung =
Aufgezeichneter Ton oder Lesen von Text (Name und Beschreibung)

Erneut abspielen OK



Den Hund spazieren führen
Plastiktüten nicht vergessen


Name

Beschreibung

Bild =
Verwenden Sie Bilder aus dem
Bildarchiv oder eigene Fotos.

So funktioniert myAbilia

Fügen Sie über myAbilia eine Aktivität in CARY Base hinzu

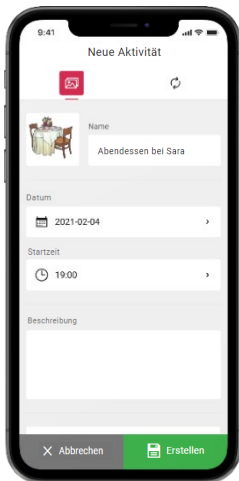

Die Aktivität wird in CARY Base angezeigt



CARY Base wird aktualisiert:
- Alle fünf Minuten
- Wenn Sie auf Kalender tippen